

O2FLO 高流量呼吸湿化治疗仪日常维护保养

1. 过滤棉更换

环境空气进气口中的过滤棉应定期更换：每 30 天**必须**更换一次；多尘地区建议每周更换一次；如果过滤棉发黑或潮湿，建议立即更换新的过滤棉，防止异物和水汽进入风机内部。

更换步骤如下：

- ① 逆时针旋转并打开空气过滤器盖子
- ② 移除过滤棉
- ③ 用干净的水清洗过滤器盖子
- ④ 用干净的布擦干过滤器盖子
- ⑤ 放入新的过滤棉
- ⑥ 将过滤器盖子顺时针旋转，关闭盖子

注意：在安装过滤棉前，请检查过滤棉是否完好及产品有效期信息



2. 主机清洁

每次使用前后用无尘布清除主机表面的灰尘，使用湿软布或 75% 医用酒精浸湿的布擦拭清洁主机外壳表面。用湿软布或棉签蘸酒精擦拭气道出气口（图 1）。湿化罐安装按钮空隙若有异物掉入、卡住，会使按钮不回弹，请仔细检查并及时清除异物（图 2）。

图 1



图 2



禁止用喷壶对准**机器后面滤网**或**风机过滤盖内**喷洒消毒水，容易导致机器内部电路短路和风机功能异常。



3. 耗材使用周期

一次性单一病人使用耗材 (不同患者使用时需更换)



湿化罐

14 天



加热呼吸管路

14 天



成人鼻氧管

14 天



儿童 / 婴儿吸氧管

7 天

4. 6pin数据连接线更换

当机器屏幕出现“温度探头未安装”，“检查加热丝”，“超温”报警或温度数值不上升时，建议更换 6pin 数据连接线。必要时请和加热呼吸管路一起更换。

